



Manual de usuario Receptor P168

Válido para P168 para 3 dispositivos

Aplicable a la edición de software 8.12+



Proser Clínic, S.L.U
Pol. Ind. Can Barri, Nau 2
08415 Can Barri (Bigues I Riells)
España

Teléfono: 938638065 - 900352633
Correo electrónico: pedidos@proserclinic.es
Web: <https://proserclinic.es>

Índice

Presentación	3
Encendido del receptor	3
Apagado del receptor	3
Funcionamiento	4
Carga del receptor	4
Emparejar un monitor	5
Rutina de comprobación	5
Tabla de indicaciones Receptor	6
Características técnicas Receptor	7
Indicaciones de seguridad.....	8

Presentación

El receptor P168 Plesio Pager se puede usar para monitorizar los sistemas de Alert-it en domicilios particulares, o entornos similares en los cuales no se van a monitorizar más de tres sistemas.

Encendido del receptor

Importante: Durante el envío el receptor Plesio Pager puede que pierda un poco de carga, así que se recomienda cargar el receptor antes de su uso. (ver el dorso).

Para encender el Receptor pulse el botón ON/OFF durante 3 segundos. El receptor emitirá un pitido y parpadearán una vez los tres leds. El led VERDE "Pager" parpadeará cada 8 segundos para mostrar que el receptor está preparado para emparejar un dispositivo.

Emparejar / Silenciar

Led de Alarma



Led del receptor

Led del monitor

Encendido/Apagado

Si el receptor se enciende y está emparejado con un monitor en modo de conexión continua (modo RF), el led rojo "Monitor" del receptor se encenderá cada 8 segundos y si está conectado de forma estándar solamente se encenderá cuando reciba una señal de un monitor.

Apagado del receptor

Para apagar el receptor, presionar y mantener presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos. En el receptor se encenderán al mismo tiempo los tres leds tres veces seguidas.

Funcionamiento

El sistema usa un protocolo de comunicación vía radio de clase II diseñado por Alert-it para evitar interferencias. Si el receptor tiene emparejado un monitor en modo de conexión continua el led “monitor” del receptor se iluminará cada 8 segundos y emitirá una alarma cuando el receptor esté demasiado lejos el monitor.

Nota: El cuidador debe resolver este problema porque el usuario estará desprotegido en este caso.

Modo alarma

Cuando se active un sensor o se pulse el botón CALL del monitor el led Alarm del receptor se encenderá, emitirá un sonido y vibrará. Al presionar el botón PAIR/MUTE se silenciará temporalmente el tono de la alarma y se detendrá la vibración del receptor durante 2 minutos, pero seguirá encendido el led Alarm y parpadeará el led “monitor”. El receptor reanudará el estado de alarma después de 2 minutos.

Una vez se haya reseteado la alarma, pulsando el botón reset del monitor, se activará de nuevo la alarma en el receptor y presionando el botón PAIR/MUTE se eliminará el aviso completamente.

Carga del receptor

La batería del receptor debe durar aproximadamente 3 días, dependiendo de la cantidad de alarmas que se hayan activado durante ese periodo.

Cuando la batería del receptor esté baja, el led verde “pager” empieza a parpadear cada segundo, lo que indica que el receptor debe cargarse.

Cuando la batería está muy baja, el receptor emitirá un sonido cada minuto. El led verde “pager” se encenderá cada 8 segundos durante la carga y se quedará fijo cuando la batería esté cargada por completo.

Cargue el receptor durante al menos 12 horas.

Emparejar un monitor

Por lo general, el monitor se emparejará con el receptor antes de ser enviado. Si este no es el caso, las instrucciones a continuación le mostrarán cómo realizar el emparejamiento.

Emparejar un monitor al receptor

Asegúrese de que el monitor esté encendido. El emparejamiento solo es posible durante los primeros 30 segundos después de encender el receptor. Para vincular el monitor con el receptor, colóquelo cerca del receptor y mantenga presionado el botón PAIR/MUTE del receptor.

Accione el botón CALL del monitor para activar una señal de radio desde el monitor o espere 8 segundos para que se envíe, en caso de que el monitor esté conectado en modo de conexión continua. Si se han emparejado el monitor y el receptor, se escuchará un pitido y se encenderá el led rojo "Monitor", después soltar el botón PAIR/MUTE. Un pitido más suave sin la luz roja "Monitor" indica que el monitor está demasiado lejos para emparejarse. Esto evita los emparejamientos con otros monitores que se encuentren alrededor.

Para eliminar monitores emparejados del receptor, mantenga presionado el botón de ON / OFF y el botón PAIR / MUTE en los primeros 30 segundos después del encendido, y escuchará una secuencia de pitidos, cuando termine los pitidos el monitor está desemparejado y empezará a parpadear el led verde Pager, en ese momento se pueden soltar los botones.

Rutina de comprobación

Se recomienda comprobar el sistema semanalmente, simulando la alarma y comprobando que el receptor recibe la señal.

Estado	Vibración	Sonido	Led "Monitor" (Rojo)	Led "Pager" (Verde)	Led "Alarma" (Rojo)
Deja de recibir señal del monitor en modo continuo (RF)	No	Du-Di-Du un tono cada minuto	Encendido Permanente	N/A	N/A
Modo Alarma (cuando recibe señal del monitor)	Si	Activado	Parpadea cada segundo	N/A	Encendido permanente
Modo Alarma silenciado	No	No	Parpadea cada segundo	N/A	Encendido permanente
Modo Alarma monitor reseteado	Si	Activado	N/A	N/A	Encendido permanente
Batería baja Monitor	No	No	Parpadea cada segundo	N/A	N/A
* Batería muy baja Monitor	No	Activado cada minuto	Parpadea cada segundo	N/A	N/A
Encendido y emparejado monitor en modo continuo	No	No	Parpadea	N/A	N/A
Encendido y emparejado monitor estándar	No	No	No	N/A	N/A
Apagado	No	Tres pitidos	3 parpadeos	3 parpadeos	3 parpadeos
Encendido	No	Un pitido	1 parpadeo	1 parpadeo	1 parpadeo
Batería baja Receptor	No	No	N/A	Parpadea cada segundo	N/A
Batería muy baja Receptor	No	Activado cada minuto	N/A	Parpadea cada segundo	N/A

Características técnicas Receptor

Alimentación:	1.3mm 9V DC
Peso:	144 gr
Material:	Plástico ABS blanco, antimicrobiano
Dimensiones:	120 x 70 x 20 mm (Altura x Ancho x Profundidad)
Batería:	2 x AA (HR6) Ni-MH recargables 2500 mAh
Duración batería:	80 horas (100 normalmente)
Tiempo de carga:	12 horas

- El sistema cumple con 93/42/EEC como accesorio adecuado para asistir dispositivos médicos con uso en entornos de atención médica domiciliaria
- El sistema cumple con EN60601 de Seguridad Eléctrico de clase 2 (no necesita toma de tierra) el Grupo 1 de clase B para compatibilidad electromagnética en un entorno de atención médica domiciliaria
- El sistema tiene un receptor de radio que cumple con EN300-220 que opera a 434.075MHz de banda ancha.

Indicaciones de seguridad



Este símbolo indica que hay advertencias y precauciones asociadas al uso de este equipo. Debe leer y comprender perfectamente este manual de instrucciones antes de utilizar el equipo.

1. Asegúrese de que el cable del sensor está bien colocado y asegurado con el fin de evitar el riesgo de enredos y estrangulaciones.
2. Asegúrese de que el cable de alimentación está bien colocado con el fin de evitar tropiezos.
3. Revise regularmente el suministro eléctrico con el fin de evitar daños y posibles riesgos de descargas.
4. Limpie y desinfecte cada parte regularmente de acuerdo con la información que aparece en la página anterior.
5. Asegúrese, mediante pruebas, de que las alarmas se anuncian en el emplazamiento(s) del cuidador.
6. Utilice solamente el suministro eléctrico y las pilas recomendadas.
7. Mantenga el suministro eléctrico y el receptor alejados del calor directo y sin cubrir durante su uso.
8. Al igual que con todos los equipos electrónicos médicos, existe la posibilidad de que el equipo tenga interferencias o de que se vea afectado por interferencias de otros dispositivos eléctricos o electrónicos. Por este motivo, evite colocar el monitor, el sensor o el cable conector cerca de dispositivos electrónicos sensibles o de dispositivos que produzcan fuertes campos electromagnéticos como transmisores de radio, teléfonos móviles o cables eléctricos.
9. Solamente utilice el monitor con accesorios autorizados para su uso con este producto y solo de acuerdo con las instrucciones.
10. Si el equipo se modifica de algún modo, se debe realizar una inspección y comprobación adecuada para garantizar que el equipo puede seguir utilizándose de forma segura.
11. El cuidador debe realizar una evaluación de riesgos para determinar si el nivel de fiabilidad que ofrece todo el sistema es el suficiente o si es necesaria una supervisión adicional. Póngase en contacto con el fabricante para pedir ayuda con las Herramientas de evaluación de riesgos.
12. Algunos accesorios vienen acoplados con tornillos pequeños y tienen bolsas de plástico. Asegúrese de que no lleguen a manos de pacientes vulnerables que puedan ahogarse con ellos.



Proser Clínic, S.L.U
Pol. Ind. Can Barri, Nau 2
08415 Can Barri (Bigues I Riells)
España

Teléfono: 938638065 - 900352633
Correo electrónico: pedidos@proserclinic.es
Web: <https://proserclinic.es>

