

Circuito de los medicamentos y DM | Surtido preparación del medicamento

## TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

El triturador de pastillas Tookan® permite triturar los comprimidos hasta obtener un **polvo fino**. Está equipado con un asa que facilita la trituración de las pastillas sin esfuerzos y conviene así a todos.

Gracias a las bolsitas almacenables en el Tookan®, **ninguna pérdida ni contaminación** está posible con otros medicamentos. ¡ Se cumple entonces totalmente el higiene !



Manejable



Ergonómico



Higiénico



- De uso simple
- Materiales resistentes a los productos de desinfección del ámbito hospitalario
- Trituración sin esfuerzo
- Almacenamiento de las bolsitas en el triturador



## SURTIDO PREPARACIÓN DEL MÉDICAMENTO

# TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

- Base de chapa de acero con tratamiento epoxy
- Asa de poliamida
- Pieza de aluminio anodizado para triturar
- Ejes de inox

#### BOLSITAS PARA TRITURADOR

- Polietileno transparente de baja densidad
- Espesor : 180/200 µm
- Respetuoso del medio ambiente



*Descripción*

*Dimensiones (en mm)*

*Referencia*

**Triturador manual de pastillas Tookan®**

L. 265 x An. 75 x Alt. 90

NA00017

**Lote de 1000 bolsitas para Tookan®**

L. 50 x Alt. 120

NA00011.01

### PROCESO DE USO



Tomar una bolsita en el compartimiento del triturador.



Poner las pastillas en la bolsita de polietileno e introducir la bolsita en el triturador.



Apoyar con la mano después relajar.



Ahora, Ud puede tomar las pastillas convertidas en polvo.

### Equipamientos adicionales

Ud puede ver nuestro folleto sobre el triturador triturador de bolsillo.